



# Materiais do Cliente

**Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device  
(Swab Nasofaríngeo)**

41FK10

PARA USO EXTERNO  
Produto não disponível em todos os países.



# Folheto informativo

- Download:  
<https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.547064.S2R4E4A3.20201002.9015.4113153>



**COVID-19  
AMPLIANDO A  
TESTAGEM**

PANBIO™ COVID-19 Ag  
RAPID TEST DEVICE  
PARA DETECÇÃO DO  
ANTÍGENO DA COVID-19

- Para pacientes com suspeita atual de infecção da COVID-19
- Respostas rápidas para os pacientes:  
resultados do teste entre 15–20 minutos
- Confiável, alto desempenho\*
  - Sensibilidade: 93.3% (98.2% para amostras com valores de Ct ≤33)
  - Especificidade: 99.4%
- Possibilidade de implantar um *Point of Care* em diversas unidades,  
descentralizando o diagnóstico
- Solução acessível que possibilita testes em ampla escala




Panbio™ COVID-19 Ag  
Rapid Test Device\*

15 min

C T

# Resumo do produto PPT

- Download:  
<https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.547065.S2R4E4A3.20201002.9015.4114605>

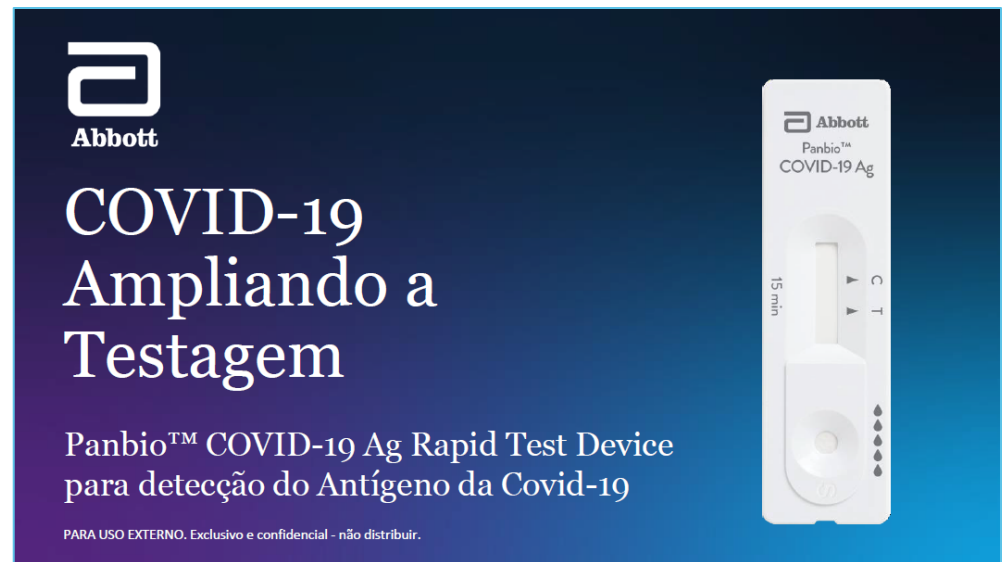

The image shows the packaging for the Abbott Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device. The packaging is white and features the Abbott logo at the top left. The text on the packaging reads: "Abbott Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device para detecção do Antígeno da Covid-19". Below the text, there is a small image of the test device itself, which is a white plastic strip with a circular window and a small opening. The text "15 min" is visible on the side of the device. At the bottom of the packaging, there is a small line of text: "PARA USO EXTERNO. Exclusivo e confidencial - não distribuir."

# Diagrama – Uso dos testes

- Download:
- <https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.556592.S2R4E4A3.20201216.9015.4144976>





# Guia de Referência Rápida

- Download:  
<https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.547068.S2R4E4A3.20201001.9015.4115331>

**Panbio<sup>®</sup>**  
**Abbott** **COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE<sup>®</sup>**  
(SWAB NASOFARÍNGEO)

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA  
**REF 41FK10**

1 2 3 4  
3-4x


5 x5 6 5x 7 15-20 MIN 8

SUPORTE TÉCNICO: ABBOTT.COM/POCT

© 2020 Abbott. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas pertencem ao grupo Abbott de empresas ou a seus respectivos proprietários (20007232-01 08/20. \*Em fase final de registro.

# Dicas de Coleta

- Download:  
<https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.581839.S2R4E4A3.20210419.9015.4165788>






**Abbott**

**DICAS TÉCNICAS**




**COLETA DE SWAB NASOFARÍNGEO PARA O PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE**

**Lembretes Importantes**

- Use somente o swab nasofaríngeo específico para coleta de amostra fornecido com o kit de teste.
- Não use os swabs de controle positivo ou negativo para a coleta da amostra.
- Amostras de swabs diretos coletadas de indivíduos, devem ser testadas imediatamente após a coleta. Se o teste imediato não for possível, a amostra do swab poderá ser mantida em no tubo de extração fornecido no kit e preenchido com tampão de extração (300 µl) em temperatura ambiente (15 °C-30 °C) por até duas horas antes do teste.

- 1 Incline a cabeça do paciente para trás em um ângulo de 45° a 70° para liberar a passagem pela frenal do nariz.  

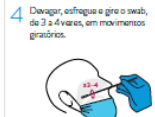- 2 Insira o swab na narina, em paralelo ao palato. Aponse o swab na direção do lóbulo da orelha do paciente e insira-o lentamente. Não use força ao inserir o swab; ele deve atravessar naturalmente a passagem nasal.  

- 3 O swab deve atingir uma profundidade igual à distância entre as narinas e a abertura externa da orelha.  


Observação: Se você sentir resistência, remova o swab e tente fazer a inserção na narina oposta. Faça a inserção no ângulo apropriado, apontando na direção do lóbulo da orelha.

- 4 Devagar, esfregue e gire o swab, de 3 a 4 vezes, em movimentos giratórios.  

- 5 Deixe o swab no lugar por alguns segundos para absorver as secreções.  

- 6 Remova o swab lentamente, girando-o.  


© 2021 Abbott. Todos os direitos reservados. Todos os marcos comerciais e marcas comerciais do grupo de empresas Abbott, ou de seus respectivos parceiros. Todos os ícones e imagens da página para fins ilustrativos. Qualquer pessoa registrada nos Estados Unidos é um médico. O equipamento e reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. Para obter a relação completa, consulte nos endereços [www.abbott.com](http://www.abbott.com), [www.abbott.com.br](http://www.abbott.com.br) ou [www.abbott.com/br](http://www.abbott.com/br).

# Demonstração do procedimento de teste (Vídeo)

- Assistir / Download:
- <https://alere.wistia.com/medias/itnrnrblp2>





# Procedimento do teste (Swab Nasofaríngeo) Live Action Video


- Assistir / Download:
- <https://alere.wistia.com/medias/82co9bznbc>



# #CONHEÇAASCURVAS

## Guia educacional para ajudar as pessoas a entender o teste COVID-19


- Download here:
- <https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.565874.S2R4E4A3.20210209.9015.4155987>

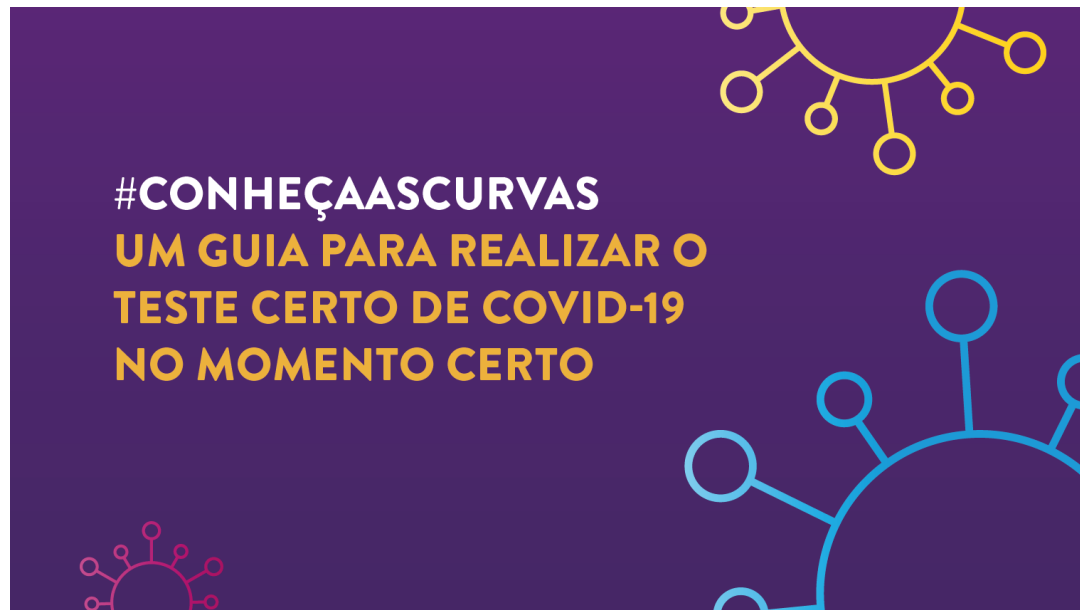

# Conectividade – Sympheos System

## Folheto informativo

- Download:
- <https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.571177.S2R4E4A3.20210419.9015.4158770>

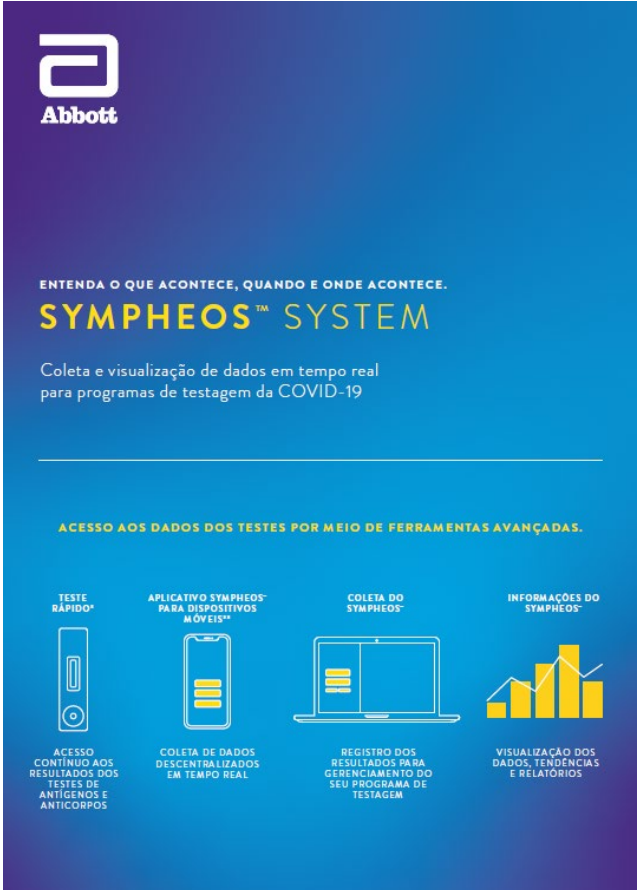

The flyer features the Abbott logo at the top left. The main title is 'SYMPHEOS™ SYSTEM' in large, bold, yellow and white letters. Below the title, it states 'Coleta e visualização de dados em tempo real para programas de testagem da COVID-19'. A horizontal line separates this from the bottom section, which is titled 'ACESSO AOS DADOS DOS TESTES POR MEIO DE FERRAMENTAS AVANÇADAS.' and contains four columns of icons and text describing the system's capabilities.

**Abbott**





ENTENDA O QUE ACONTECE, QUANDO E ONDE ACONTECE.

## SYMPHEOS™ SYSTEM

Coleta e visualização de dados em tempo real para programas de testagem da COVID-19


---

ACESSO AOS DADOS DOS TESTES POR MEIO DE FERRAMENTAS AVANÇADAS.

TESTE RÁPIDO*	APLICATIVO SYMPHEOS™ PARA DISPOSITIVOS MOVEIS™	COLETA DO SYMPHEOS™	INFORMAÇÕES DO SYMPHEOS™
			
ACESSO CONTÍNUO AOS RESULTADOS DOS TESTES DE ANTÍGENOS E ANTICORPOS	COLETA DE DADOS DESCENTRALIZADOS EM TEMPO REAL	REGISTRO DOS RESULTADOS PARA GERENCIAMENTO DO SEU PROGRAMA DE TESTAGEM	VISUALIZAÇÃO DOS DADOS, TENDÊNCIAS E RELATÓRIOS


# Conectividade – Sympheos System Ecosystema Abbott PPT

- Download:
- <https://ensur.invmed.com/ensur/contentAction.aspx?key=ensur.574230.S2R4E4A3.20210419.9015.4147759>

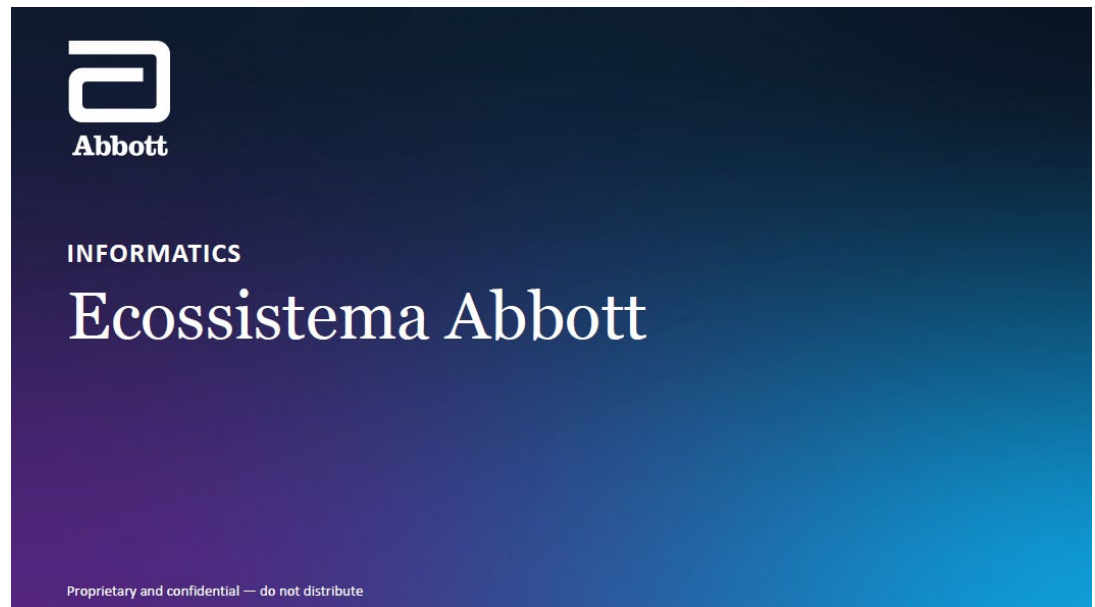

# Conectividade – Sympheos System Video/Animação

- Assistir / Download:
- <https://alere.wistia.com/medias/6xeovprood>

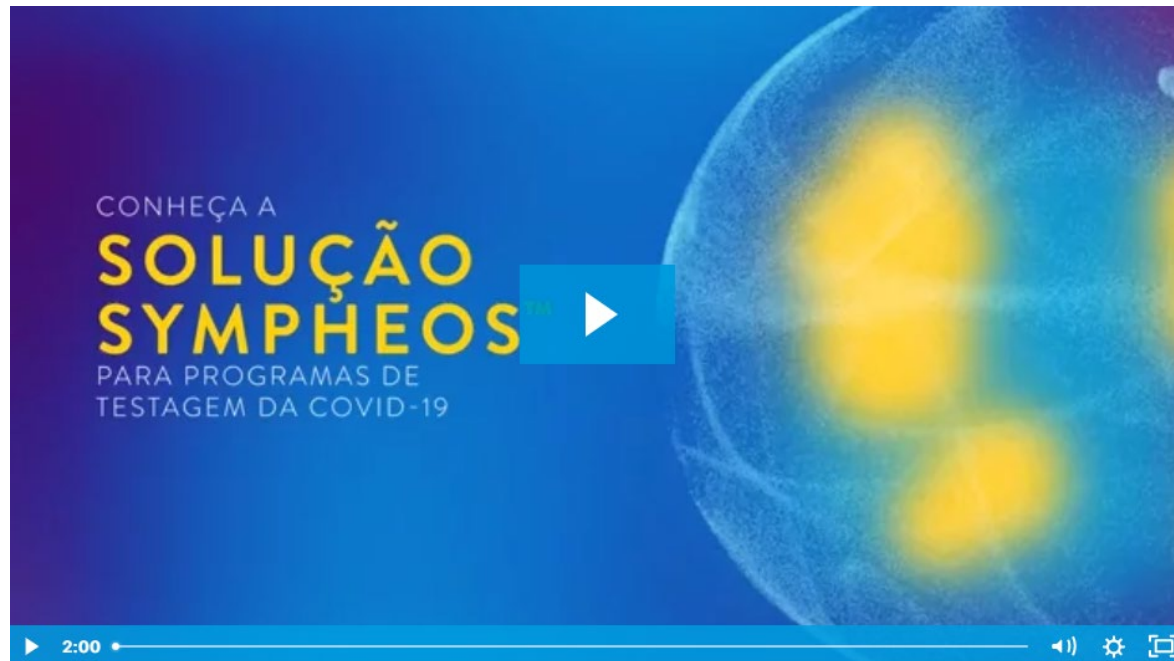



**Abbott**